

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer:      | 02-090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN Code:           | 4260206622666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gebrauchsanweisung: | <p>Wundnahtstreifen aus der Verpackung nehmen.<br/>Wundkanten vorsichtig ausrichten.<br/>In der Mitte der Wunde beginnen, legen Sie die Hälfte des Streifens auf eine Seite der Wunde, bringen Sie die beiden Seiten der Wunde vorsichtig zusammen und führen Sie den Streifen dann darüber.<br/>Legen Sie die Streifen abwechselnd über und unter den ersten Streifen, dies hilft, die Kanten zusammenzupassen und die Spannung auf der Haut gleichmäßig zu verteilen. Diesen Vorgang fortsetzen, bis die Wunde vollständig geschlossen ist.<br/>Zur zusätzlichen Fixierung, zur Reduzierung der Spannung und zur Verankerung der Streifenreihen, zwei Streifen senkrecht über die Reihen legen - einen auf jeder Seite der Wunde.</p> |