

Artikelnummer:	02-128
EAN Code:	4260206626619
Gebrauchsanweisung:	<p>Was müssen Sie bei der Anwendung der Akupunkturpflaster beachten? Die Haut muss trocken und fettfrei sein, starke Behaarung sollte entfernt werden. Bei Juckreiz, Blasenbildung und Rötungen der Haut oder anderen negativen Reaktionen entfernen Sie bitte sofort das Tape und suchen den behandelnden Arzt oder Heilpraktiker auf. Akupunkturpflaster darf nicht auf Körperöffnungen, auf eine offene Wunde oder besonders empfindliche Hautstellen angelegt werden. Bei gereizter und generell empfindlicher Haut sollte das Tape nicht angewendet werden. Akupunkturpflaster sollte nur so lange getragen werden, wie 100%iger Tragekomfort und Wohlbefinden gegeben wird. Wie ist das Akupunkturpflaster anzuwenden? Suchen Sie den schmerzenden Punkt durch Bewegen der Gelenke oder Muskeln. An diesen Triggerpunkten legen Sie ein Tape an. Tägliches Duschen mit dem Pflaster ist möglich, ebenso das anschließende Eincremen mit einer Bodylotion. Zur Unterstützung im sportlichen Bereich legen Sie das Tape 20-30 Minuten vor der sportlichen Aktivität an. Wann sollten Sie die Akupunkturpflaster nicht anwenden? Pflasterallergie; Tumore; Akute Entzündung (Wundrose); Frische Venenthrombose; Thrombophlebitis; Allergische Hautreaktion; Schwere Herzinsuffizienz. Bei Krankheiten oder länger anhaltenden Schmerzen ist es notwendig den Arzt aufzusuchen. Akupunkturpflaster sollte lediglich als begleitende Maßnahme eingesetzt werden. Es ersetzt keine vollwertige Behandlungs- oder Therapieform.</p>