

Artikelnummer:	02-134
EAN Code:	4260206626572
Gebrauchsanweisung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reißen Sie den Beutel erst direkt vor der Anwendung auf. Achten Sie beim Öffnen darauf, dass das Wärme-Pflaster nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommt.</li> <li>• Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebeseite des Pflasters. Legen Sie das Pflaster mit der Klebeseite auf die Haut in der schmerzenden Region auf. Bringen Sie das Pflaster fest an und achten Sie darauf, dass die Wärmeelemente nicht überlappen.</li> <li>• Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das Pflaster die Behandlungstemperatur erreicht.</li> <li>• Für eine maximale Wirkung empfehlen wir Ihnen, das Pflaster 8 Stunden einwirken zu lassen. Tragen Sie das Pflaster nicht länger als 8 Stunden. Wenden Sie das Pflaster nicht länger als 8 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden an.</li> <li>• Legen Sie das Pflaster <u>glatt</u> auf die Haut auf. Das Pflaster darf keine Falten oder Wülste bilden, da dies mit einem erhöhten Risiko für Brandwunden verbunden ist.</li> <li>• Nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach dem Gebrauch entsorgen.</li> </ul> <p>Inhaltsstoffe: Eisenpulver, Wasser, Aktivkohle, Holzmehl, Salz</p> <p>Warnhinweise Dieses Produkt kann Brandwunden verursachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen ab 55 Jahren: Das Risiko für Brandwunden nimmt mit steigendem Alter zu.</li> <li>• Bei älteren oder behinderten Personen darf das Pflaster nur unter Aufsicht angewendet werden.</li> <li>• Personen mit empfindlicher Haut oder mit vorherigen allergischen Reaktionen gegen Medikamente oder Kosmetika sollten dünne Kleidung unter dem Pflaster tragen.</li> <li>• Legen Sie das Pflaster nicht während des Schlafs, nach einem Bad oder einer Dusche an.</li> <li>• Benutzen Sie das Pflaster nicht während sportlicher Aktivitäten.</li> <li>• Ziehen Sie vor der Anwendung einen Arzt zu Rate, wenn Sie an Diabetes, schlechter Durchblutung, einer Herzerkrankung oder rheumatoider Arthritis leiden, bei Einnahme von Medikamenten oder wenn Sie schwanger sind.</li> <li>• Jede Wärmeelemente enthält Eisen, das bei Verschlucken gesundheitsgefährdend sein kann. Spülen Sie im Fall von Verschlucken den Mund mit Wasser aus und setzen Sie sich direkt mit dem Gift-Notruf in Verbindung.</li> <li>• Sollte der Inhalt des Wärme-Pflasters mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommen, spülen Sie ihn direkt mit Wasser ab. Die Wärme-Pflaster dürfen grundsätzlich nicht in der Mikrowelle erwärmt oder erneut aufgewärmt werden, weil die Pflaster in der Mikrowelle Feuer fangen können. Bei unsachgemäßer Anwendung können die Wärme- Pflaster auch bei geringen Temperaturen Hautreizungen verursachen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Nicht in der Mikrowelle erwärmen.</li> </ul> <p>Bei Anwendung des Produkts Folgendes beachten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollieren Sie die Haut regelmäßig auf Anzeichen für Verbrennungen, Blasen oder allergischen Reaktionen – wenn Sie entsprechende Anzeichen finden, entfernen Sie das Pflaster.</li> <li>• Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn die Schmerzen nach 7 Tagen schlimmer werden oder weiterhin anhalten.</li> <li>• Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung oder tragen Sie dünne Kleidung unter dem Pflaster.</li> <li>• Tragen Sie das Pflaster nicht unter eng anliegender Kleidung.</li> <li>• Üben Sie keinen Druck auf das Produkt aus.</li> <li>• Vor Kernspintomographien (MRT-Untersuchungen) muss das Produkt entfernt werden, um ein vermehrtes Risiko für Brandwunden zu vermeiden.</li> </ul> <p>Nicht anwenden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn der Inhalt der Wärmeelemente austritt und/oder der Wärme-Umschlag beschädigt oder eingerissen ist.</li> <li>• Auf erkrankter, verletzter oder geschädigter Haut.</li> <li>• Auf Prellungen und Schwellungen.</li> <li>• Auf Körperstellen ohne Wärmeempfindung.</li> <li>• Im Gesicht, am Kopf, auf Brust, Arminnenseiten, Achselhöhlen, Fingern, Leiste, Kniekehle, Füße oder Zehen.</li> <li>• Wenn das Ablaufdatum überschritten ist.</li> <li>• Nicht anwenden in Verbindung mit Schmerzmittel, medizinischen Lotionen, Cremes, Salben und in Verbindung mit Haarsprays, Deos oder Parfüm.</li> <li>• Nicht für Säuglinge und Kinder geeignet.</li> </ul> <p>Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung für die Anwendung des Wärme-Pflasters. Die Firma WUNDmed übernimmt im Fall von unsachgemäßer Anwendung keine Haftung. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung bis zum Ende der Anwendung auf.</p>