

Artikelnummer:	04-012; 04-013; 04-017; 04-019; 04-055
EAN Code:	4260206620754; 4260206621461; 4260206624073; 4260206627951; 4260206627920
Gebrauchsanweisung:	Nur zur äußerlichen Anwendung. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Keine Anwendungen länger als 20 Minuten. Zwischen den Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten. Bei Herz-, Kreislauf-, und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden! Eine beschädigte Kompresse keinesfalls mehr verwenden. Haushaltübliche Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Kinder, die dieses Produkt anwenden, müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.